

## Produktdatenblatt

<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>SILOMED</b> Universal Silikonspray
<b>Artikel-Nr.</b>	MEG 600150
<b>PZN</b>	01267455
<b>Produktbeschreibung / Zweckbestimmung:</b>	Zur Schmierung von beweglichen Teilen in der Medizintechnik, soweit Silikone zugelassen sind. Zuverlässiges Gleitmittel für Gummi- und Kunststoffprodukte. Speziell zur Schmierung und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen chirurgischen Instrumenten hervorragend geeignet.
<b>Produktspezifikationen:</b>	physiologisch unbedenklich, geruchs- und geschmacksneutral, sparsam im Gebrauch
<b>Anwendungshinweise:</b>	Die Instrumente nach dem Reinigen und Trocknen öffnen und in mehreren Schichten übereinander in eine Schale legen. Den Sprühstrahl vor allem direkt auf die Gelenke richten. Sprühentfernung 20-30 cm.  <b>Nicht für Instrumente aus Silikonelastomeren verwenden!</b>
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur vollständig entleert der Wertstoffsammlung zuführen.
<b>Zusammensetzung:</b>	Dimethylpolysiloxan. Treibgas: Propan-Butan.
<b>Verpackungseinheit:</b>	500 ml Dose, UK = 12 Dosen
<b>EG-Konformitätserklärung:</b>	Die genannten Erzeugnisse erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745. Die Produkte sind der Klasse I zugeordnet. Die Konformität der Erzeugnisse mit o.g. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

