



Safety-Kanüle

Handhabungshinweis

Vor der Blutentnahme

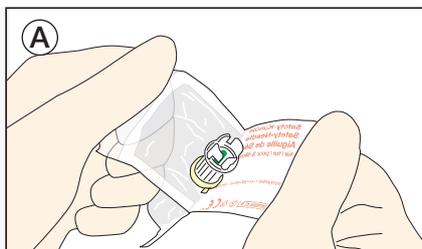


Die Verpackung wird mit Daumen und Zeigefinger mittels Peel-off Technik geöffnet.

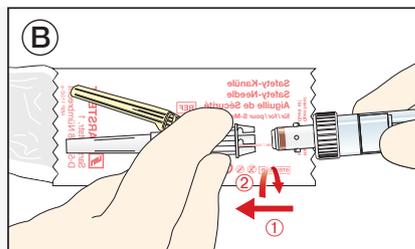


Die S-Monovette® wird mit dem Kanülenhalter der Safety-Kanüle konnektiert.

ODER

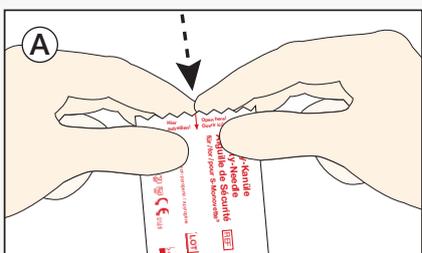


Die Verpackung entlang des mittigen Pfeiles aufreißen.

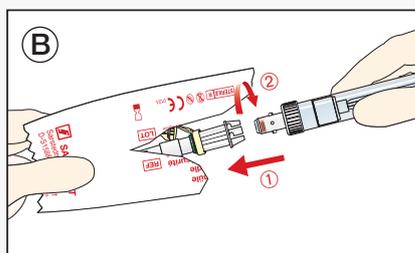


Die S-Monovette® wird mit dem Kanülenhalter der Safety-Kanüle konnektiert.

Nach der Blutentnahme

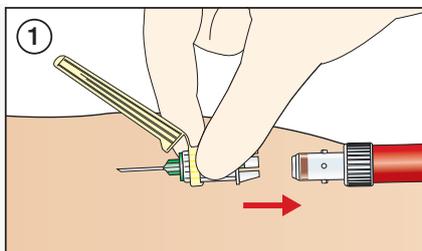


Die letzte S-Monovette® aus der Safety-Kanüle lösen und anschließend die Safety-Kanüle aus der Vene ziehen.


Aktivierung des Kanülenschutzes...

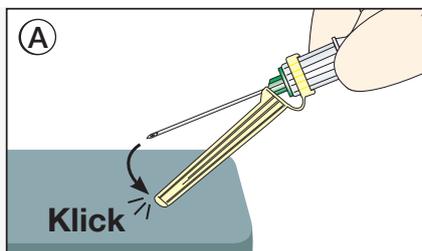

Den Kanülenschutz auf einer stabilen Oberfläche aufsetzen und aktivieren.

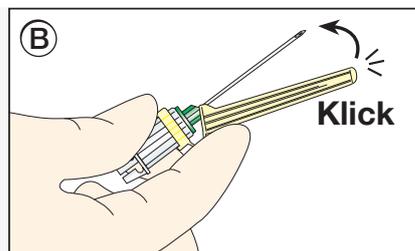

Alternativ den Kanülenschutz mit dem Zeigefinger am unteren Ende aktivieren.

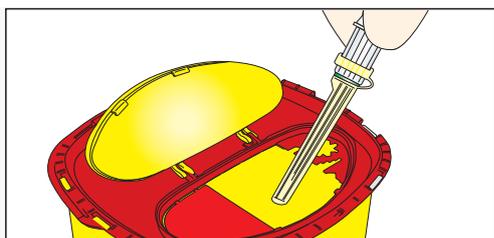


Nach Aktivierung des Kanülenschutzes wird die gesicherte Safety-Kanüle in eine Entsorgungsbox gegeben.


Safety-Multifly®-Kanüle

Handhabungshinweis

Vor der Blutentnahme

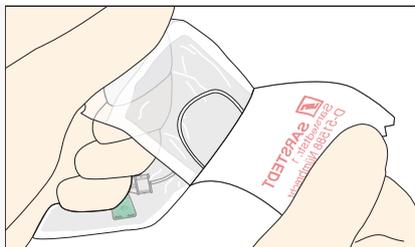


Die Verpackung wird mit Daumen und Zeigefinger mittels Peel-off Technik geöffnet.

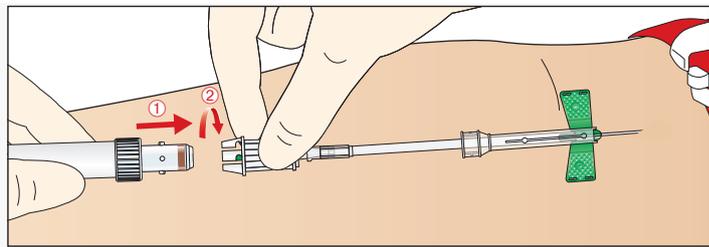

Die S-Monovette® wird mit dem Kanülenhalter der Safety-Multifly®-Kanüle konnektiert.


Nach der Blutentnahme

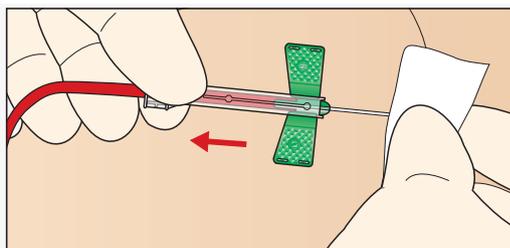

Fassen Sie den Kanülenschutz oben und unten am hinteren Ende mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie die Safety-Multifly®-Kanüle aus der Vene.


Aktivierung des Kanülenschutzes...

...in der Vene

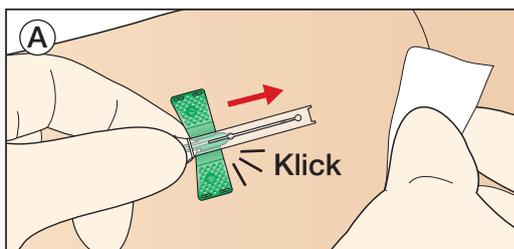


Aktivieren Sie den Kanülenschutz parallel zum Herausziehen der Safety-Multifly®-Kanüle aus der Vene.

...außerhalb der Vene

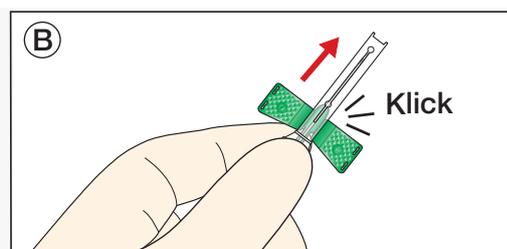

Ziehen Sie die Safety-Multifly®-Kanüle aus der Vene und aktivieren Sie den Kanülenschutz.

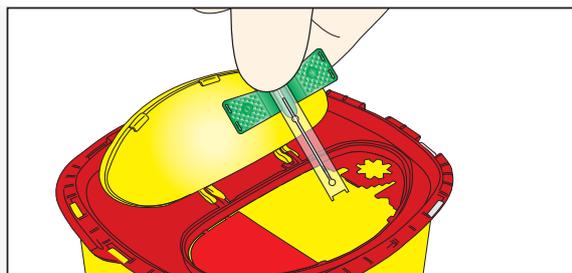

Nach Aktivierung des Kanülenschutzes wird die gesicherte Safety-Multifly®-Kanüle in eine Entsorgungsbox gegeben.