



Der RescueClean P6 Powerreiniger ist auf das Beseitigen von wasserunlöslichem Schmutz abgestimmt, der in der Reinigungsflotte dispergiert werden muss. Die hartnäckigen Verschmutzungen (z. B. Ruß) werden aufgebrochen und die Schmutzpartikel werden eingekapselt.

RescueClean P6 ist ein schaumarmes Konzentrat für den Einsatz in allen gängigen Reinigungsautomaten oder auch zur manuellen Vorbehandlung. Die Dosierungsempfehlung liegt bei lediglich 0,4-1,0%. So ist RescueClean P6 trotz der sehr guten Dekontaminationsleistung materialverträglich und kann für die unterschiedlichsten Gegenstände eingesetzt werden. RescueClean P6 ist im Gegensatz zu RescueClean P2 eher für stärkere Verschmutzungen und längere Spülprogramme geeignet.

Bitte stellen Sie bei Produktwechsel sicher, dass alte Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmittel beseitigt wurden. Es kann sonst zu kurzfristigen Verfärbungen führen, die aber meist nach wiederholten Wäschen verschwinden. Schaumbildung in der Maschine ist üblicherweise durch Spülmittelrückstände der Vorreinigung zurückzuführen.

- | löst problemlos hartnäckigen Schmutz an
- | Dispersion wasserunlöslicher Partikel im Wasser
- | sehr materialverträglich und schaumarm
- | sehr wirtschaftlich
- | optimal für Wassertemperaturen ab ca. 50°C



Artikelnummer:

113952. 5L Kanister

Inhaltsstoffe:

< 5 % Polycarboxylate, < 5 % Phosphonate,  
< 5 % anionische Tenside, < 5 % Phosphate

Gutachten/Normen:

Diverse Prüfungen gem. „Qualitätssicherung von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen“, unter Berücksichtigung der DIN ISO/TS 15883-5:2006-02 „Reinigungs-Desinfektionsgeräte Teil 5: Prüfanschmutzungen und -verfahren zum Nachweis der Reinigungswirkung CEN ISO/TS 15883-5:2005“ sowie der DIN EN ISO 15883-7:2016-10 „Reinigungs-Desinfektionsgeräte – Teil 7: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit chemischer Desinfektion für nicht invasive, nicht kritische thermolabile Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen (ISO 15883-7:2016); Deutsche Fassung EN ISO 15883-7:2016“ durchgeführt.

Hygienische Leistungen in Verbindung unterschiedlichster Masken und Helmen und vielen Reinigungsautomaten, wie z. B. von Meiko, Electrolux, ALRO, Rescyou, etc. bestätigt.

Zubehör: Dosierpumpe, 51mm  
Auslaufhahn, 51mm