

GEBRAUCHSANWEISUNG

ULTRASTOP ANTIBESCHLAGMITTEL

15 ml Spray
25 ml Flasche mit Tropfpipette

EIGENSCHAFTEN

ULTRASTOP Antibeschlagmittel ist eine klare, farblose Lösung, die eine Kombination oberflächenaktiver Substanzen in einer alkoholisch-wässrigen Matrix (Ethanol, gereinigtes Wasser, < 5 % oberflächenaktive Substanzen) enthält.

Das Medizinprodukt ist in zwei Handelsformen erhältlich:

- ULTRASTOP Antibeschlagmittel 15 ml Spray
- ULTRASTOP Antibeschlagmittel 25 ml Flasche mit Tropfpipette

VERWENDUNGSZWECK

ULTRASTOP ist ein Antibeschlagmittel für medizinische Optiken.

Oberflächenaktive Substanzen in einer speziellen Kombination bilden an den behandelten Oberflächen eine klare und transparente Schicht aus. Dieser sehr dünne Film bewirkt, dass eine Tröpfchenbildung und damit das Beschlagen der Oberfläche durch kondensierten Wasserdampf verhindert wird.

ULTRASTOP kann auch dazu verwendet werden, das Beschlagen von optischen Brillen oder medizinischen Schutzbrillen während medizinischer Untersuchungen oder chirurgischer Eingriffe zu reduzieren.

ANWENDUNGSGEBIETE

ULTRASTOP ist ein Antibeschlagmittel für medizinische Untersuchungsspiegel und medizinische Optiken, die nicht streng aseptisch gehandhabt werden müssen. Die Anwendungsdauer beträgt üblicherweise weniger als 60 Minuten.

ULTRASTOP Antibeschlagmittel ist geeignet für:

- medizinische Untersuchungsspiegel (z.B. Larynx- und Epipharynxspiegel, Dentalspiegel) und Endoskoplinsen (insbesondere in der HNO-Heilkunde, für die Koloskopie),
- optische Brillen und medizinische Schutzbrillen,
- Linsen und Spiegel in Mikroskopen und anderen medizinischen Optiken.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

ULTRASTOP Antibeschlagmittel ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

• Auftragen der Lösung

Eine kleine Menge ULTRASTOP entweder direkt oder mit Hilfe eines mit ULTRASTOP befeuchteten, nicht fasernden Tuches auf die trockene, reine Oberfläche aufbringen und gleichmäßig verteilen. Kurz einwirken lassen und nach dem Verdunsten gegebenenfalls mit einem trockenen, sauberen, nicht fasernden Tuch sanft nachpolieren.

ULTRASTOP schmiert bei richtiger Anwendung nicht, jedoch kann bei zu dickem Auftragen die Oberfläche etwas trüb erscheinen. In diesem Fall wird eine Reinigung der Oberfläche mit destilliertem Wasser und einer neuerlichen Behandlung, wie oben angeführt, empfohlen.

• Haftdauer und Anwendungsmenge

Die Haftdauer kann in Abhängigkeit von den eingesetzten Geräten, der behandelten Körperhöhle, einer eventuellen Verschmutzung der Linse stark variieren. Die Anwendung kann unter Beachtung der oben angegebenen Anwendungshinweise so oft wiederholt werden wie während des Eingriffs/der Untersuchung erforderlich.

BESONDERE HINWEISE FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

- ULTRASTOP ist zur Anwendung an Glas und Kunststoffen geeignet. Sollten diese Materialien bereits beschichtet sein oder Zweifel an der Beständigkeit eines Materials bestehen, wenden Sie sich an den jeweiligen Hersteller oder Händler des zu behandelnden Gegenstandes.
- ULTRASTOP enthält hochprozentigen Alkohol (Ethanol). Bewahren Sie offene Flaschen oder mit ULTRASTOP getränkte Tücher fern von Hitzequellen auf, um eine Entzündung der Lösung zu vermeiden.
- Der Sauger des Pipettensets (25 ml Flasche mit Tropfpipette) besteht aus Naturkautschuk, der bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen kann.

MELDUNG VON SCHWERWIEGENDEN VORKOMMISSEN

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit ULTRASTOP Antibeschlagmittel auftritt, dem Hersteller (E-Mail: pms@mono.co.at) sowie ihrer zuständigen Behörde melden:

Österreich – Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)

Traisengasse 5, 1200 Vienna – AT, fax: +43 50555 36409, E-Mail: medizinprodukte@basg.gv.at, Website: <http://www.basg.at/>

Deutschland – Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Kurt Georg Kiesinger Allee 3, D - 53175 Bonn, Fax: +49 228 207 5300, E-Mail: medizinprodukte@bfarm.de, Website: <http://www.bfarm.de/>

LAGERUNGSHINWEISE

- Nicht über 25 °C lagern.
- Lichtschutz erforderlich.

HALTBARKEIT





ULTRASTOP ist bei ordnungsgemäßer Lagerung bis zu dem auf dem Faltpapier und Etikett angegebenen Verfalldatum haltbar. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach der ersten Anwendung muss die Lösung innerhalb von 8 Wochen verwendet werden.

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN

Die auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

	Hersteller		Vertrieb
	Medizinprodukt		Artikelnummer
	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis
	Nicht über 25 °C lagern		Lichtschutz erforderlich
	Gebrauchsanweisung beachten!		Vorsicht: siehe "Besondere Hinweise für die sichere Anwendung"

Scannen Sie den QR-Code auf dem Faltpapier für die Gebrauchsanweisung in

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv.

Hersteller: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien, Österreich

E-Mail: pms@mono.co.at



Vertrieb: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT